

КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КМ-01 (new) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Медицинские кровати с механической регулировкой секций предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: кровать общебольничная, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение параметров
1. Габаритные размеры (ВхШхГ)	840х905х2084
2. Количество секций	2
3. Количество регулируемых секций	1
4. Размер подматрачной секции (ДхШ)	2000х900
5. Размер головной секции (ДхШ)	727х800
6. Угол наклона регулируемой секции	50°
7. Масса	39 кг

Отклонение веса указанного в таблице - $\pm 10\%$

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы кровати рекомендуется производить:

- осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций);
- осмотр ножек кровати (надежность их фиксации к раме ложа), проверку надежности крепления спинок.

В случае обнаружения ослабленных соединений - затянуть болты ключом.

Предельная распределенная нагрузка на ложе: 200 кг

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Кровать общебольничная может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

Кровать общебольничная устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при температуре -50°С... +50°С.

Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи - 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.