

КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ КМ-04 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Медицинские кровати с винтовой регулировкой секций предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: кровать общебольничная, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение параметров
1. Габаритные размеры (ВхШхГ)	830x975*х2240*
2. Количество секций	4
3. Количество регулируемых секций	3
4. Размер спинной секции (ДхШ)	775x905
5. Размер неподвижной секции (ДхШ)	215x905
6. Размер тазобедренной секции (ДхШ)	375x905
7. Размер ножной секции (ДхШ)	535x905
8. Масса	72 кг

Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

*Габарит указан с учётом размера бамперов.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы кровати рекомендуется производить:

- осмотр подвижных секций (надёжность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций);
- осмотр ножек кровати (надёжность их фиксации к раме ложа, самих колёс), проверку надёжности крепления спинок.

В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом.

Допустимая распределённая нагрузка 250 кг.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Кровать общебольничная может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 80%.

Кровать общебольничная устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при температуре -50°C... +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.