
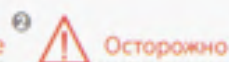


Содержание

Технические характеристики	3
Предупреждения	3
Перед началом работы	4
Показания и противопоказания	5
Аппарат и аксессуары	6
Размеры аксессуаров	7
Обозначения на экране	8
Подготовка к эксплуатации	9, 10
Порядок работы	11
Режимы работы	12
Функция "Пропуск"	13
После эксплуатации	13
Техническое обслуживание	14
Поиск и устранение неисправностей	14
Соглашение	15
Гарантийный талон	15

Важная информация! Перед началом работы

Следующими 4 значками в этой инструкции помечены предупреждения и ограничения, которых необходимо придерживаться для безопасной и правильной эксплуатации аппарата. Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с этими разделами. Храните инструкцию в доступном месте.

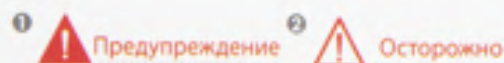

Технические характеристики

Название изделия	Компрессионная лимфодренажная система
Название модели	LymphaNorm Balance
Электропитание	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт (± 10%)
Диапазон давления	0-250 мм. рт. ст.
Размер корпуса изделия	195 (Ш) × 265 (В) × 180 (Г) мм

Предупреждения при использовании!



- 1) Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, если Вы страдаете тяжёлыми хроническими заболеваниями.
- 2) Не разбирайте самостоятельно аппарат.
(Это может привести к поражению электрическим током).
- 3) Возможно ухудшение самочувствия если вы используете аппарат слишком долго или сразу в начале процедуры массажа устанавливаете слишком большое давление.
- 4) Проконсультируйтесь с врачом, если Вы почувствовали ухудшение самочувствия.
- 5) В случае выключения электропитания в сети во время работы, выключите аппарат и выньте вилку из розетки.
- 6) Используйте аппарат только по назначению – в соответствии с настоящей инструкцией.
- 7) Не вставляйте и не вынимайте вилку мокрыми руками
(это может привести к удару током).
- 8) Не используйте аппарат во влажных или жарких местах.
(Это может привести к повреждению устройства или удару электрическим током)
- 9) Включайте аппарат только после того, как Вы надели массажные манжеты.
(Иначе возможно повреждение массажных аксессуаров).

Важная информация! Перед началом работы

Спасибо, что выбрали оборудование торговой марки LymphaNorm!

Аппараты LymphaNorm разработаны южно-корейскими специалистами, сочетают в себе высокую надежность, доступную цену, отличное качество и большой набор функций. Процедуры на аппаратах LymphaNorm рекомендованы Всем!

LymphaNorm — это повышение иммунитета, снятие усталости, крепкое здоровье и хорошее настроение!

↳ В каких случаях необходима прессотерапия:

→ Здоровье:

- Снятие отеков всех видов;
- Лечение и профилактика варикоза;
- Восстановление кровообращения и микроциркуляции;
- Венозная недостаточность;
- Ревматический артрит;
- После мастэктомии;
- Лимфостаз;
- Лимфедема.

→ Красота:

- Коррекция фигуры;
- Избавление от целлюлита;
- Избавление от лишнего веса;
- Повышение тонуса кожи.

→ Спортивная медицина

- Восстановление после физических нагрузок;
- Восстановление после травм.

1. Перед первым использованием прибора необходимо внимательно ознакомиться со всеми инструкциями, содержащимися в данном руководстве. Для справки, данное руководство всегда должно находиться под рукой.

2. Все упаковочные материалы прибора необходимо сохранять на случай необходимости транспортировки. Оригинальные упаковочные материалы разработаны специально для защиты системы от повреждения во время транспортировки.

Показания и противопоказания

Показания

- Варикозное расширение вен
- Венозная недостаточность
- Лимфовенозная недостаточность
- Лимфедема (отечность)
- Хроническая венозная недостаточность
- Лимфостаз рук после мастэктомии
- Посттравматические отеки конечностей
- Послеоперационная отечность
- Ослабленная циркуляция крови
- Целлюлит
- Ожирение
- Сахарный диабет
- Синдром холодных ног
- Флебопатия (жалобы на боль, тяжесть, утомляемость и отечность нижних конечностей к концу дня)
- Слабый тонус кожи и низкая эластичность
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Отечный синдром при приеме пероральных контрацептивов
- Подагра
- Артриты
- Артрозы
- Коксартроз
- Простатит
- Запоры
- Стрессы, синдром хронической усталости
- Нарушение метаболизма кишечника
- Эректильная дисфункция (импотенция)
- Паралич конечностей
- Трофические язвы нижних конечностей
- Для коррекции фигуры и похудения
- Для ускорения и облегчения процесса заживления ран
- При малоподвижном образе жизни
- После хирургической операции липосакции
- После процедуры кавитации
- После физических нагрузок
- Для лечения спортивных травм
- После длительных перелетов
- Прессотерапия необходима лежачим больным и людям, ограниченному в движениях.

Противопоказания

Аппарат имеет минимальное количество противопоказаний:

- Наличие кардиостимулятора
- Острый тромбоз вен нижних конечностей




При наличии острых и хронических заболеваний, перед применением аппарата необходимо проконсультироваться с лечащим врачом!
С осторожностью: Во время беременности и в период грудного вскармливания

Аппарат и аксессуары

Лицевая часть корпуса

LED панель для управления аппаратом

Разъем для шлангов подачи воздуха

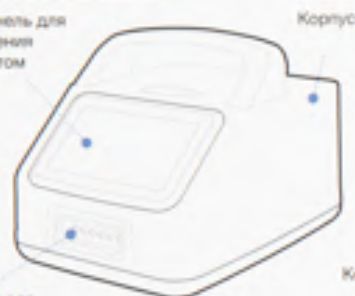

Корпус

Задняя часть корпуса

Корпус устройства

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ


Шнур питания



Соединительный шланг

Шланговый штекер

Шланговый соединитель

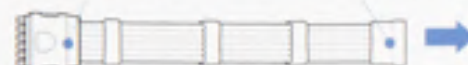

На фото показано соединение шлангов пары манжет.

Заглушка для шланга



Поставляется с дополнительными манжетами.


Манжета

Шланговый соединитель

"Карман" для шлангов

Номер камеры

Пара манжет для ног

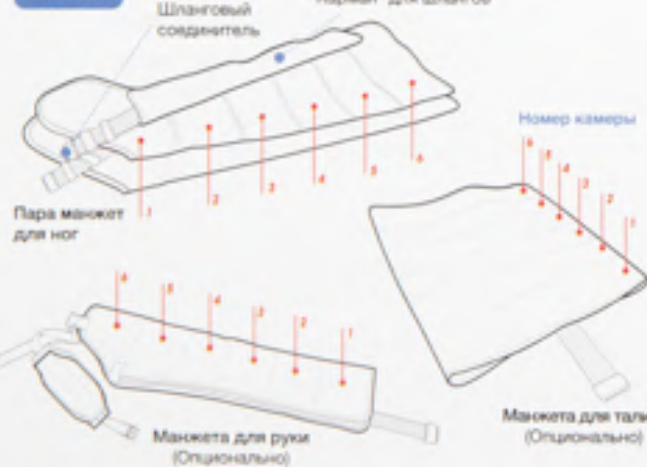

Манжета для руки (Опционально)

Манжета для талии (Опционально)

Манжета-шорты (Опционально)

Размеры аксессуаров



Манжета-шорты




Манжета для талии (пояс)



Манжета для ног



Расширитель

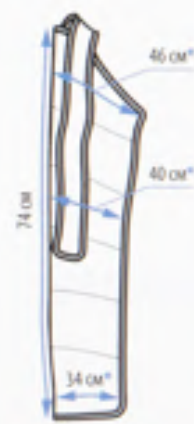


Манжета для рук


* — длина окружности

Обозначения на экране

Панель для установки параметров работы

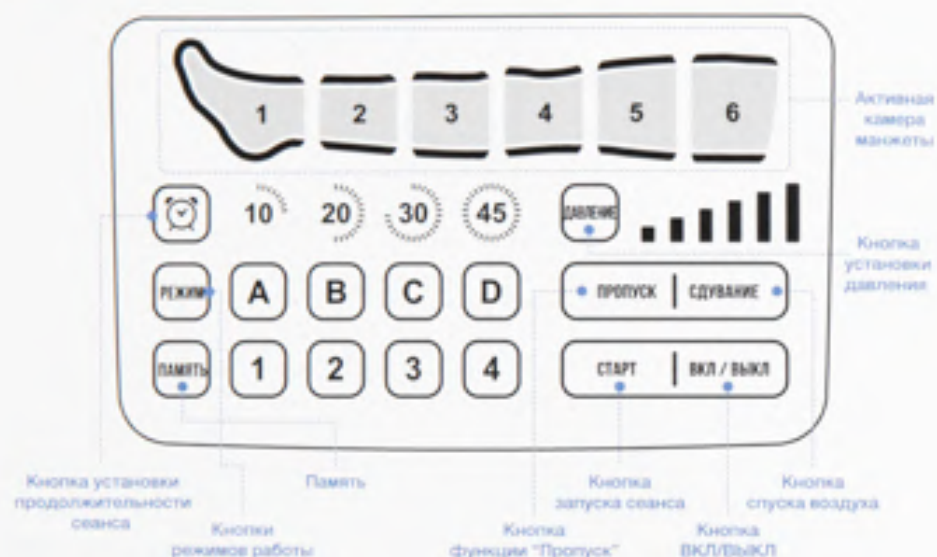

Разъем для шлангов

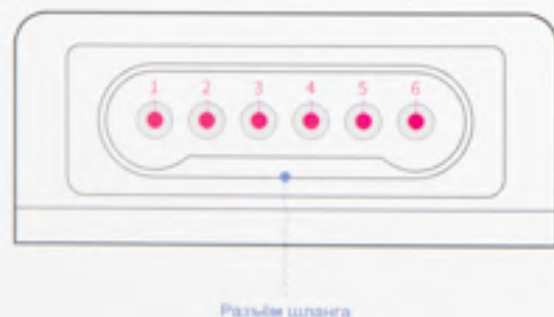


Подготовка к эксплуатации

- 1 Проверьте электричество в помещении для эксплуатации аппарата: 230В, 50Гц
- 2 Вставьте шнур питания в розетку.
- 3 Разместите устройство на ровной поверхности и расположите его рядом с собой.
- 4 Включите выключатель питания (0: Выкл, —: Вкл.). На экране появится индикация давления.



Аппарат включается при нажатии кнопки питания в направлении "—". Всегда выключайте аппарат после использования.

- 5 Соедините шланг аппарата А с шлангом манжеты В, затем вставьте разъем шланга в гнездо на аппарате. Знак стрелки на разъемах должен быть вверх.

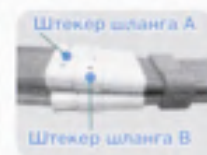

Обозначение должно быть вверх.

- 6 Перед началом использования аппарата наденьте одежду из мягких тканей.
- 7 Не перемещайтесь в манжетах.

Подготовка к эксплуатации

- 8 Расстегните застежку-молнию на манжете для ноги, поместите в неё ногу и натяните манжету до бедра.

Накройте молнию защитной пленкой и зафиксируйте застежку на липучку, предотвращая, тем самым, повреждение на теле.



- 9 Присоединение расширителя к манжете для ноги.

Потяните застежку-молнию до упора и используйте липучку, чтобы затянуть её.



Расширитель манжеты для ноги

- 10 Наденьте манжету для руки, застегните фиксирующий ремень и отрегулируйте его так, чтобы в манжете было комфортно.

- 11 Во избежание чрезмерного давления надевайте манжету для талии немного ниже грудной клетки, как показано на рисунке 6.



Застёжка на липучке манжеты-шорты
Застёжка на липучке манжеты для талии




- 12 Во избежание чрезмерного давления надевайте манжету-шорты немного ниже грудной клетки, как показано на рисунке 7.

- 13 Проверьте, все ли соединения герметичны, затем включите нужную программу.

- 14 Для использования манжеты для руки или другой одинарной манжеты, подключите её к одному шлангу, а затем заблокируйте другой шланг заглушкой.



Порядок работы

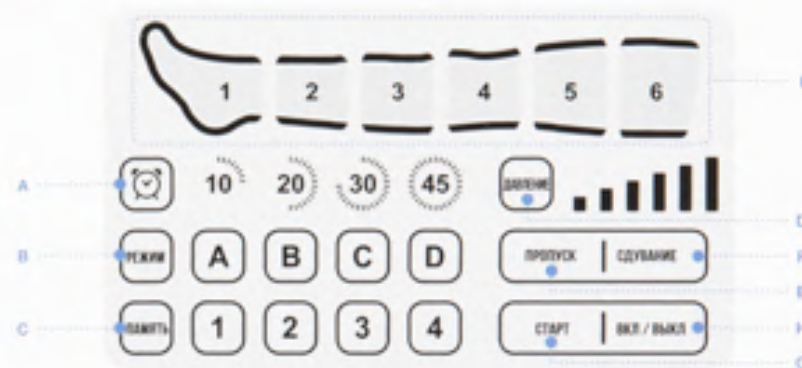

- 1 Обозначения на экране

- A) Установка времени: 10, 20, 30, 45 минут
B) Режим работы: A, B, C, D
C) Функция памяти: 1, 2, 3, 4
D) Установка давления: 1-6 уровень

- E) Кнопка функции "Пропуск"
F) Функция сдувания воздуха
G) Функция запуска
H) Включение/выключение

- 2 Порядок работы

- A) Кнопка для настройки времени:
В аппарат заложено 4 варианта продолжительности сеанса. По умолчанию сеанс длится 10 минут. Для установки другой продолжительности сеанса нажать кнопку повторно.

- B) Режимы работы:
Пользователи могут выбирать режим работы из A, B, C и D. Смена режима работы происходит по аналогии с изменением продолжительности сеанса. По умолчанию запускается режим работы "A"

- C) ПАМЯТЬ:
В аппарат заложено 4 ячейки памяти. Сохранить настройки можно после установки продолжительности сеанса, режима работы, уровня давления и функции "Пропуск".

- D) ДАВЛЕНИЕ:
В аппарат заложено 6 уровней давления. Смена уровня давления осуществляется нажатием клавиши ДАВЛЕНИЕ.

- По умолчанию аппарат начинает работу на 1 уровне давления.

- E) ПРОПУСК:
Функция "Пропуск" используется, когда пользователи хотят отключить определённые камеры. Для отключения функции необходимо нажать кнопку ПРОПУСК и удерживать её в течение 3 секунд.

- F) СДУВАНИЕ ВОЗДУХА:
Осуществляется нажатием клавиши СДУВАНИЕ. Сдувание длится 20 секунд.


- G) СТАРТ:
Запуск массажа осуществляется нажатием клавиши СТАРТ после выбора режима, продолжительности сеанса и уровня давления.

- H) ВКЛ/ВЫКЛ
Однократное нажатие включает аппарата, повторное нажатие отключает.

Режимы работы

- 1 Ниже приведена схема режимов работы аппарата. Активная в текущий момент камера мигает.
- 2 Информация о статусе работы от камеры 1 до камеры 6.
Красная подсветка камеры указывает на то, что она накачивается.

Режим работы А

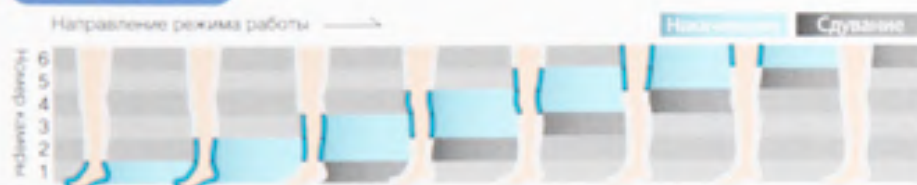

Режим работы В




Режим работы С



Режим работы D



Функция “Пропуск”

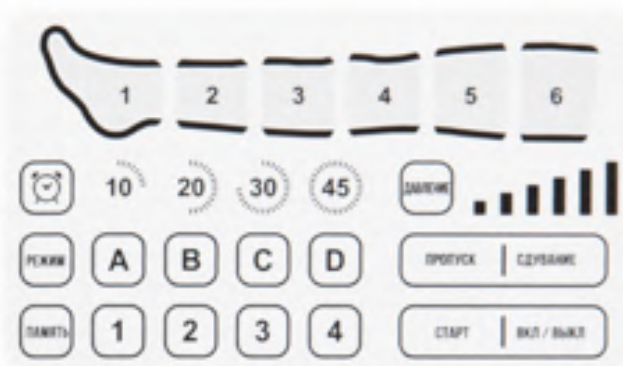

- 1 Функция «Пропуск» используется при болевых ощущениях пациента в какой-либо части тела с целью пропуска этой области при использовании устройства.
- 2 Функция «Пропуск» отключает любые одну или несколько камер.
- 3 Для активации функции «Пропуск», перед стартом программы нажмите кнопку **ПРОПУСК** и, повторным нажатием кнопки **ПРОПУСК**, выберите камеру для отключения (выбранная камера будет мигать). Нажмите и удерживайте (около 3 секунд) кнопку **ПРОПУСК** для отключения выбранной камеры.

После эксплуатации

- 1 Аппарат останавливает работу по истечении заданного времени процедуры. Если вы хотите прервать процедуру раньше, нажмите **STOP**.
- 2 После остановки работы аппарата, нажмите **СДУВАНИЕ** для откачки оставшегося в манжетах воздуха и снимите манжеты.
- 3 Переведите клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ**, расположенную на задней части корпуса в положение **ВЫКЛ**.
- 4 Отсоедините шланги от аппарата.